DENTAL MATERIAL

____ 제품은 Titanium. Stainless Steel. Plastic등의 소재로 제조된 제품이다

는 Miles 이 (John Miles Geet) Plate(등의 모에도 제고는 제급하다. 사용목**적 및 성등** 치아가 상실된 부위에 Fixture를 식립하고 인상모형을 제작하기 위해 Fixture에 Impression Coping 체결하여 인상을 채결하고 Lab Analog에 체결하여 인상 모형을 제작 할 때 사용한다

보관방법

25 VII 501 - 1210 V II 1210 9 V II

직사광선이 없는 실온의 건조한 곳에 보관한다.(1[,] 사용방법

사용방법 (Fixture Level) ① Fixture에 Impression Coping을 연결한 뒤 Hex Driver를 이용하여 Screw을 고정시킨 후 X-n 로 확인 후 인상을 채득한다. ② 인상재를 분리하여 Impression Coping에 Lab Analog를 체결한 ③ Artifical Gum을 주입하여 Tissue를 재현한다. ④ 인상재에 Boxing을 하고 석고를 주입하여 업 모형을 완성한다.

업 모형을 천장난다.
(Abutment Level)
① Abutmentoll impression Cap을 One Touch 형태로 연결하여 인상을 채득한다. ② 인상재를 분리하여 Impression Cap에 Lab Analog를 체결한다. ③ Anificial Gurm을 주일하여 Tissue를 재한한다.
④ 인상재에 Boving을 하고 석고를 주입하여 작업 모형을 완성한다. ⑤ 완성된 작업 모형에 Pastic Coping을 체결하고 높이 등을 조절 한 후 Wax-Up을 시행하여 최종 Crown을 제작한다.

④ 인상재에 Boring을 하고 석고들 수입이어 그룹 그룹도 Coung을 체결하고 높이 등을 조절 한 후 Wax-Llp을 시행하여 최종 Crown을 제작한다. (사용 전 준비사항)
① 임상가는 제품을 사용하기 전에 제품의 상태, 성능 및 기능을 완전하게 숙지한다. ② 제품 사용 전 의심되는 부분은 당사로 문의하여 확인 후 사용한다. ③ 시술 시 환자의 구강상태 점검 및 정확한 판단에 의한 계획이 선행되어야 한다. ④ 환자 상태를 고려하여 시술에 적합한 시술 기구를 준비한다. (사용 시 주의사항)
① 정위치에 체결되었는지 확인하고 사용한다. ② Lab Analog를 삭제 또는 변형 시 작업모형 제작이 불가능하다. ③ 시술 시 환자의 구강상태 점검 및 정확한 판단에 의한 계획이 선행되어야 한다. ④ 환자 상태를 고려하여 시술에 적합한 시술 기구를 준비한다. (역급포방법)

의료기기이므로 132℃에 최소 4분 이상 고압증기멸균한 후 30분 동안 건조하여 사용한다.

시 기공직업시에반 사용한다. 금기사항

① 조절되지 않은 중증의 내과적 질환을 가진 환자 (당뇨, 고혈압 등과 같은 내분비, 순환기 질환)
② 악성 중앙 등으로 고선량의 방사선 치료를 받는 환자 ③ 악간관계와 교한관계에 문제가 있는 환자 ④ 구강 내 감염 또는 염증이 있는 환자부적절한 구강위생, 이같이, 구강진중) ⑤ 임신 중인 환자, 흡연자이거나 알코올 중독자, 약물남용환자, 신경증, 정신병 등 감정이 불안정한 환자, 장신 질환자 ⑥ 혈액응고 부전이나 심한 심장질환을 앓고 있는 환자 ② 티타늄 알러지 환자 ⑥ 기타 치주, 외과적 수술이 금기시 되는 환자 부작용
① 브저교하 시격소상으로 위한 감각이상, 감염, 부종, 피하출혈, 통증, 봉합의 벌어진, 연조의 게양

① 부정교합, 신경손상으로 인한 감각이상, 감염, 부종, 피하출혈, 통증, 봉합의 벌어짐, 연조직 궤양 등의 국소적인 합병증이 생길 수 있다. ② 나사풀린, 임플란트 또는 인공보철물의 파절이 생길 수 있다. ③ 임플란트 주위의 골 손실, 점막염 등이 생길 수 있다. 사용 후 보관 및 관리방법

었다. ③ 암글단트 수위의 할 관실, 엄덕암 등이 정실 수 있다. 사용 후 보관 및 관리방법 ① 구강 내 삽입되는 모든 제품은 일회용이므로 재사용을 금한다. ② 개봉 후에는 사용하지 않았더 라도 페기한다. ③ 사용한 제품의 포장은 폐기한다. ④ 시술이 끝난 후 사용한 시술기구는 알코올, 세척제, 증류수 등을 이용하여 사용 즉시 세척하여 멸균, 건조하여 보관한다.

경고 OH 어플란트 시술교육 및 실습을 마친 치과의사만이 사용할 수 있으며, 시술자는 제품에 대한 사용 조작 방법 및 주의 사항을 완전히 숙지한 후 사용해야 하며 치료계획에 맞는 제품을 선택한다. 적 절하지 않은 환자의 선정이나 시술은 임플란트 실패나 수술 후의 임플란트 주위의 골상실의 원 인이 될 수 있다.

※ 본 제품은 일회용 비멸균 의료기기임.

Information of Symbol REF (2) O NOT USE IN OLEKNOT IN OMMAGED LOT \sim *** CALIFOR COMBUST ACCOMPINION BIO BOOGGING TO R only 淡



 \square i

제조/판매원 : (주)네오바이오텍 (26351) 강원도 원주시 지정면 신평로70 Tel : 033-742-2885, Fax : 033-742-2887